

Termómetros timpánicos: recomendaciones de uso

PROTOCOLO DE USO DEL TERMÓMETRO ÓTICO TIMPÁNICO GENIUS 2

1.- Antes de usar el termómetro GENIUS 2 comprobar que la lente del termómetro está limpia. Si no lo está obtendremos TEMPERATURAS BAJAS.



El cristal de la punta metálica tiene que estar brillante. Sin ningún tipo de veladura ni suciedad.

2.- Si está sucia, hay que limpiarla con ALGODÓN o una GASA en SECO sin usar ningún tipo de alcohol o limpiador.

3.- Si hemos tenido que limpiar el termómetro lo dejaremos sin usar durante 45 minutos.

4.- Teniendo el termómetro en perfecto estado de uso lo utilizaremos de la siguiente forma:

a.- Ponemos una funda en la punta metálica del termómetro.

b.- Introducimos el termómetro en el conducto auditivo del paciente.

c.- Apretamos el botón triangular azul de la parte superior del termómetro.

d.- Una vez tomada la temperatura , se retira el termómetro, y expulsamos la funda con el botón de expulsión situado arriba de la punta metálica.

5.- Una vez terminada la toma de las temperaturas comprobamos la punta y si necesita limpieza la realizamos.

6.- La toma repetitiva de T^a , debe realizarse a intervalos separados de **2 minutos** en el mismo oído, hay que esperar por tanto al enfriamiento de la punta de la sonda del termómetro pues de lo contrario puede dar error de medición.